



## CUSCINO TERMICO CON NOCCIOLI DI CILIEGIO

C302AAC001

Cuscino termico con noccioli di ciliegio per un rimedio naturale contro crampi e tensione muscolare. Il cuscino, rivestito in cotone e suddiviso in quattro sezioni, permette una distribuzione equa del calore per un effetto di tepore uniforme sul corpo. Dopo essere riscaldato in microonde, il contenuto di noccioli di ciliegio rilascia calore andando ad alleviare dolori ed irrigidimento muscolare. Facile e veloce da usare, con rivestimento in cotone sfoderabile per il lavaggio.

Utilizzo a caldo: posizionare il cuscino all'interno del forno a microonde e scaldare a 800W per circa 30 secondi; regolare le tempistiche di riscaldamento in base alle diverse tipologie di microonde; riscaldare nuovamente per raggiungere la temperatura desiderata e collocare sulla superficie corporea

Beper S.r.l.

Via Antonio Salieri, 30 37050 Vallese di Oppeano (VR)

[www.beper.com](http://www.beper.com)



Utilizzo a freddo: posizionare il cuscino all'interno del frigorifero o del freezer per circa 30 - 45 minuti; rimuovere e posizionare sull'area del corpo desiderata

---

Beper S.r.l.

Via Antonio Salieri, 30 37050 Vallese di Oppeano (VR)

[www.beper.com](http://www.beper.com)

# **beper**



## CUSCINO TERMICO CON NOCCIOLI DI CILIEGIO

**C302AAC001**

**DIMENSIONI PRODOTTO:** 51X21,5 CM

**MATERIALE:** TESSUTO COTONE E NOCCIOLI CILIEGIO

**PESO NETTO:** 890 G KG

**DIMENSIONE IMBALLAGGIO:** 24X18X7 CM

**IMBALLAGGIO:** GIFT BOX

**NR PEZZI PER COLLO:** 6

**NR PEZZI X PALLET:** 252



8056420224306

Beper S.r.l.

Via Antonio Salieri, 30 37050 Vallese di Oppeano (VR)

[www.beper.com](http://www.beper.com)